

# TOOTEKATALOOG



---

Tervema maailma nimel



AS Chemi-Pharm arendab, valmistab ja turustab desinfitseerimisvahendeid, isikliku hügieeni vahendeid, puhastus- ja erihooldustooted.

Lisaks kuuluvad Chemi-Pharmi brändide hulka kodumaine luksuslik kosmeetikasari D'DIFFERENCE ning teaduspõhine tervise- ja farmaatsiatoodete bränd Medihex.

Me hoolime puhtusest ja iga inimese heast tervisest, inimkonnast ja keskkonnast, seepärast toodame ainult selliseid tooteid, mida tarbime ka ise ja mida võime igal hetkel soovitada oma kõige lähedasematele ja kallimatele inimestele.

AS Chemi-Pharm on asutatud 1997. aastal, tootmine on koondatud Eestisse, samuti asub siin ettevõtte peakontor. Meie tootenimistus on üle saja erineva desinfitseerimis-, puhastus- ja hooldustooted, mis omakorda jagunevad kuueks põhiliikseks tootegrupiks: pesemisvahendid, käte ja naha antiseptikumid, nahahooldustooted, tooted pindade pesemiseks ja desinfitseerimiseks, tooted instrumentide puhastamiseks ja desinfitseerimiseks ning kosmeetikatooted.

Tänaseks ekspordime 29 erinevasse riiki maailmas ning lisaks tervishoiusektori asutustele kuuluvad meie klientide hulka ka toiduainetööstused, puhastusteenuseid pakuvad firmad, lasteasutused ja koolid.

Meil on välja töötatud spetsiaalne terviklik desinfitseerimisvahendite sari tervishoiuasutustele, milles pööratakse suurt tähelepanu tervishoiu-

sektoris töötavate inimeste tervise säilitamisele ja taastamisele. Selleks, et vältida meditsiinipersonali hingamisteede ärrituse teket, ei sisalda enamik Chemi-Pharm'i poolt turustatavaid desinfitseerivaid isopropüülalkoholi ning tänu sellele on need sobilikud töötamiseks ka vastsündinute ja vanuritega.

AS Chemi-Pharm on oma töös alates 2001. aastast rakendanud järgnevaid ISO kvaliteedijuhtimissüsteeme: ISO 9001 (toodete kavandamine ja tootmine), ISO 14001 (keskkonnajuhtimine) ja ISO 13485 (meditsiiniseadmete kavandamine ja tootmine). Enam kui kahekümnele meditsiiniseadmete puhastamiseks ja desinfitseerimiseks mõeldud tootele on omistatud CE-märk.

Toodete väljatöötamisel oleme alati keskendunud klientide vajadustele. Meie klientidel on väga kõrged nõudmised toodete kvaliteedile, seega pöörame tähelepanu kõikidele üksikasjadele, et saavutada parimaid tulemusi.

Meile on oluline nii inimeste kui ka keskkonna tervis. Kasutades suures mahus biolagunevaid ja põhjalikult kontrollitud tooraineid ning ümbertöödeldavast plastikust ja kartongist pakendeid panustame keskkonnahoidu ning aitame oma klientidel teha keskkonnateadlikke valikuid.

AS Chemi-Pharmi kosmeetikatoodetele on omistatud nii EU Ecolabel kui ka Nordic Swan Ecolabel sertifikaadid.

---

Chemi-Pharm AS

Aadress: Tänavasilma tee 11, Saku vald 76406, Harjumaa, Eesti

Tel: +372 6778806

E-mail: [chemi-pharm@chemi-pharm.com](mailto:chemi-pharm@chemi-pharm.com)

[www.chemi-pharm.com](http://www.chemi-pharm.com)

## PESEMINE

- 6 ECOSOFT WASH LOTION SENSITIVE / Vedelseep tundlikule nahale
- 6 SENSITIVE BODY WASH / Õrnatoimeline pesugeel
- 7 ECOSOFT WASH LOTION / Lõhnastatud vedelseep normaalsele ja kuivale nahale
- 7 VISION / Kreemalusel vedelseep
- 8 SILKY HAIR SHAMPOO / Šampoon betaiiniga kõikidele juuksetüüpidele
- 8 SILKY HAIR CONDITIONER / Palsam sheavõi ja aloe vera ekstraktiga
- 8 CP WASH CREAM / Õrnatoimeline kreemalusel pesuemulsioon
- 9 CP WASH FOAM / Puhastusvaht nahale
- 9 FRESH FOAM / Puhastusvaht nahale

## KÄTE JA NAHA ANTISEPTIKA

- 11 CHEMISEPT HAND DES / Antiseptiline kätegeel
- 11 ALOE SKINSEPT / Antiseptiline kätegeel aloe veraga
- 12 CHEMISEPT GEL / Antiseptiline kätegeel
- 12 CHEMISEPT MED / Käte antiseptikum
- 13 CHEMISEPT WIPES / Antiseptilised rätikud
- 13 SWELL EXTRA CHG / Antiseptiline vedelseep
- 14 DESO SCRUB / Antiseptiline vedelseep
- 14 CHEMISEPT FG / Jalgade antiseptikum
- 15 CHEMISEPT G / Naha antiseptikum
- 15 CHEMISEPT HF / Naha antiseptikum
- 16 CHEMISEPT G COLOR / Värvainega naha antiseptikum
- 16 CHEMISEPT HF COLOR / Kloorheksidiini ja värvainega naha antiseptikum
- 17 Kuidas valida antiseptikumi?

## NAHAHOOLDUS

- 19 BIOACARE / Niisutav ja hooldav kätekreem tundlikule nahale
- 19 BIOACARE LIGHT / Ihupiim sheavõiga igale nahatüübile
- 19 BIOACARE DAILY / Keha- ja kätekreem sheavõiga igapäevaseks kasutuseks
- 20 BIOACARE PROTECT / Kaitsekreem sheavõiga igapäevaseks kasutuseks
- 20 BIOACARE INTENSE / Niisutav ja kaitsev kreem kuivale nahale
- 20 DERMALINE-1 / Parfüümivaba naha kaitsekreem
- 21 COOLING SKIN MASSAGE GEL / Jahutav massaažigeel

## PINDADE DESINFEKTSIOON

- 23 BACTICID / Alkoholi baasil kiirdesinfektsioonivahend meditsiiniseadmetele
- 23 BACTICID AF / Alkoholi baasil kiirdesinfektsioonivahend meditsiiniseadmetele
- 24 BACTICID WIPES / Alkoholi baasil kiirdesinfektsioonivahendiga immutatud rätikud meditsiiniseadmetele
- 24 BACTICID AF WIPES / Alkoholi baasil kiirdesinfektsioonivahendiga immutatud rätikud meditsiiniseadmetele
- 25 STERISEPT WIPES / Alkoholvaba desinfektsioonivahendiga immutatud rätikud meditsiiniseadmetele
- 25 STERISEPT READY TO USE / Alkoholvaba meditsiiniseadmete kiirdesinfektsiooni- ja puhastusvahend
- 26 CHEMIPHARM DES NEW / Desinfitseeriva toimega üldpuhastusvahend
- 26 SMELL NET / Lõhna eemaldava toimega desinfitseeriv puhastusvahend
- 27 CLEAN FOAM / Desinfitseeriv puhastusvaht pindadele
- 27 CHLORINEX-60 / Klooritahvleid
- 28 STERISEPT PLUS / Meditsiiniseadmete pindade desinfektsiooni- ja puhastusvahend
- 29 KASUTUSÕPETUS
- 30 Kuidas valida pindade desinfektsioonivahendit?

## ÜLDPUHASTUS

- 33 NEUTRAL CLEANER / Neutraalne üldpuhastusvahend
- 33 CLEAN FEEL / Üldpuhastusvahend
- 34 WIPER EXTRA / Tugevatoimeline vaha- ja rasvaeemaldusvahend
- 34 CLEAN FLOOR / Põrandapesuvahend masinpesuks
- 35 BOZO / Sanitaarkeraamika hooldusvahend, rooste- ja lubjasetete eemaldaja
- 35 GLASS WASHER / Valmislahus klaaspindade puhastamiseks
- 36 SMELL NET READY TO USE / Lõhna eemaldava toimega pesemisvahend, valmislahus
- 36 CASCADE HIGH / Kontsentreeritud fosfaadivaba nõude- ja üldpesuvahend
- 37 PLUMBER / Kanalisatsioonitorude ummistuste avaja
- 37 TROPIC FRESH / Õhuvärskendaja

## INSTRUMENTIDE DESINFEKTSIOON JA PUHASTUS

- 39 DES INSURANCE / Instrumentaariumi desinfitseeriv pesemisvahend
- 40 STERISEPT INSTRU / Aldehüüdivaba meditsiiniinstrumentide puhastus- ja desinfektsioonivahend
- 40 CHEMIHYD DES / Aldehüüdi baasil meditsiiniinstrumentide ja endoskoopide kõrgastme desinfektsioonivahend
- 41 CHEMISEPT SPRAY / Kosmeetikainstrumentide ja -tarvikute desinfektsioonivahend
- 41 CHEMIDES PULVER/ Aktiivhapnikul põhinev meditsiiniseadmete kõrgastme desinfektsioonivahend
- 42 Kuidas valida instrumentide puhastus- ja desinfektsioonivahendit?
- 44 STANDARDID
- 45 DOSAATORPUDELITE KANDURID
- 50 KÄTEHÕORDE TEHNIKA



# PESEMINE

# ECOSOFT WASH LOTION SENSITIVE

## Vedelseep tundlikule nahale

ECOSOFT WASH LOTION SENSITIVE on mahe ja nahasõbralik vedelseep sagedaseks käte-, keha- ja juustepesuks. Toode eemaldab õrnalt, kuid tõhusalt mustuse ning sobib normaalse, kuiva ja tundliku naha igapäevaseks hooldamiseks. ECOSOFT WASH LOTION SENSITIVE sisaldab nahka niisutavaid ja pehmendavaid aineid. Vedelseebis sisalduv betaiin aitab hoida naha niiskustasakaalu ning allantoiini tugevdab naha kaitsebarjääri, suurendades seeläbi naha kaitsevõimet ärritustele ja põletikele. ECOSOFT WASH LOTION SENSITIVE vedelseep on spetsiaalselt välja töötatud tundliku nahaga inimestele. Lõhna- ja värvainetevaba ning kaasaegsete, kvaliteetsete ja testitud koostisosadega vedelseep on eriti sobilik kasutuseks tervishoiuasutustes, toiduainetööstuses, laborites ja tööstusettevõtetes, kus sage kätepesu naha seisukorda enim mõjutab. ECOSOFT WASH LOTION SENSITIVE on dermatoloogiliselt testitud. **pH 5,5**

CPNP ref nr **4091382**



500 ml / 1000 ml /  
1000 ml dispenso / 5000 ml



Märkused

# SENSITIVE BODY WASH

## Õrnatoimeline pesugeel

SENSITIVE BODY WASH õrnatoimeline pesugeel on alkoholi-, värvaine- ja lõhnava hästi vahutav ja puhastav pesugeel, mis on välja töötatud delikaatsete piirkondade hügieeni jaoks. Sisaldab vees lahustuvaid taimseid õlisid nagu babassu- ja avokaadoõli, ning Aloe Vera Gel-i, mis niisutavad, toidavad, värskendavad ja pehmendavad nahka. Toode sisaldab ka piimhapet, mis tagab naha normaalse happelise keskkonna ja mikrofloora ning kaitseb seeninfektsioonide eest. Mõeldud kõige õrnemate piirkondade pesemiseks. Toode on äärmiselt pehme ning sobib ka käte ja kogu keha igapäevaseks pesemiseks. **pH 5**

CPNP ref nr **1310234**



500 ml / 1000 ml /  
5000 ml



Märkused

# ECOSOFT WASH LOTION

## Lõhnastatud vedelseep normaalsele ja kuivale nahale

ECOSOFT WASH LOTION on kergelt lõhnastatud, õrn ja nahasõbralik vedelseep sagedaseks käte, keha ja juuste pesuks. ECOSOFT WASH LOTION eemaldab mustuse õrnalt, kuid tõhusalt ning sobib normaalsele, kuivale ja tundlikule nahale. ECOSOFT WASH LOTION sisaldab betaiini ja allantoiini, mis pehmedavad nahka, hoiavad selle niiskustasakaalu ning tugevdavad naha kaitsebarjääri. Värvainetevaba ning kaasaegsete, kvaliteetsete ja testitud koostisosadega vedelseep on eriti sobilik kasutuseks tervishoiuasutustes, toiduainetööstuses, laborites ja tööstusettevõtetes, kus sage kätepesu naha seisukorda enim mõjutab. ECOSOFT WASH LOTION on dermatoloogiliselt testitud. **pH 5,5**

CPNP ref nr **4394704**



500 ml / 1000 ml /  
1000 ml dispenso / 5000 ml



Märkused

# VISION

## Kreemalusel vedelseep

VISION on kreemalusel nahasõbralik vedelseep käte, keha ja juuste pesemiseks. Eemaldab kiiresti ja tõhusalt mustuse, sisaldab nahka niisutavaid, pehmendavaid ja lipiidkihti taastavaid aineid, mis säilitavad naha loomuliku niiskuse, pehmuse ja pH. VISION on hästi vahutav ja mahedalõhnaline, sobib kasutamiseks tervishoiu- ja lasteasutustes ning toiduainetööstuses. **pH 5,5**

CPNP ref nr **1337956**



500 ml / 1000 ml /  
5000 ml



Märkused

# SILKY HAIR SHAMPOO

## Šampoon betaiiniga kõikidele juuksetüüpidele

SILKY HAIR SHAMPOO on lõhnavaba, toitev ja niisutav šampoon kuivade ja normaalsete juuste igapäevaseks pesemiseks. Jätab juuksed pehmeks ja läikivaks ka sagedasel kasutamisel. Sisaldab looduslikku betaiini, mis annab juustele tugevuse, läike, pehmuse ja elastsuse, kaitseb peanahka kuivuse eest ning aitab säilitada juuste niiskustasakaalu. SILKY HAIR SHAMPOO on dermatoloogiliselt testitud. **pH 5-6**. CPNP ref nr **4477892**



500 ml



Märkused

# SILKY HAIR CONDITIONER

## Palsam sheavõi ja aloe vera ekstraktiga

SILKY HAIR CONDITIONER on lõhna- ja värvainetevaba, toitev ja niisutav palsam kõikidele juuksetüüpidele. A ja E-vitamiinirikas sheavõi ning aloe vera ekstrakt toidavad ja niisutavad juukseid ning kaitsevad neid väliskeskonna mõjude eest. Parima tulemuse saavutamiseks kasutage enne palsamit sama tootesarja šampooni. SILKY HAIR CONDITIONER on dermatoloogiliselt testitud. **pH 3,5-4,5**. CPNP ref nr **4477909**



500 ml



Märkused

# CP WASH CREAM

## Õrnatoimeline kreemalusel pesuemulsioon

CP WASH CREAM on õrnatoimeline kreemalusel pesuemulsioon naha puhastamiseks juhul kui veega pesemine on raskendatud. Spetsiaalselt tundlikule ja kuivale nahale väljatöötatud pesuemulsioon on sobilik inkontinentsete patsientide ja delikaatsete kehapiirkondade puhastamiseks. CP WASH CREAM sisaldab pantenooli ning E-vitamiini- ja linoolhapperikast päevalilleseemneõli, mis rahustavad, kaitsevad, toidavad ning niisutavad nahka. CP WASH CREAM on dermatoloogiliselt testitud. **pH 5,5**

**KASUTAMINE:** Kanda väike kogus emulsiooni nahale kasutades selleks rätikut või pesukinnast, lasta toimida ning pühkida seejärel maha niiske rätiku või kindaga. Ei vaja loputamist. CPNP ref nr **4401293**



500 ml



Märkused

# CP WASH FOAM

## Puhastusvaht nahale

CP WASH FOAM on kergelt lõhnastatud seebivaba puhastusvaht keha hügieeniliseks puhastamiseks, mis sobib asendama vee ja seebiga pesu. Toode on sobilik lamavate haigete igapäevaseks kehahoolduks, eriti õrnade kehapiirkondade puhastamiseks ning kasutuseks lamatistest tingitud ärritunud nahal. CP Wash Foam koostises on glütseriin ja pantenool, mis niisutavad, pehmedavad ja kaitsevad nahka ning leevendavad ärritusi. CP WASH FOAM on dermatoloogiliselt testitud. **pH 5-6**

**KASUTAMINE:** kanda puhastatavale nahale, vajadusel kasutada selleks rätikut või pesukinnast, lasta toimida ning pühkida seejärel maha niiske rätiku või pesukindaga. Vahustamine toimub ilma survegaasita, mis on keskkonnale ohutu ega tekita nahal külmatunnet. CPNP ref nr **4361167**



200 ml / 750 ml / 5000 ml



Märkused

# FRESH FOAM

## Puhastusvaht nahale

FRESH FOAM on kergelt lõhnastatud hügieeniline seebivaba puhastusvaht kogu keha puhastamiseks, mille koostises on nahka kaitsvad, niisutavad ja pehmedavad ained. Pantenool aitab rahustada ja taastada lamatistest tingitud kahjustunud nahka, niisutab ning kaitseb seda. FRESH FOAM sobib ka kõige õrnemate kehapiirkondade ja ärritunud naha puhastamiseks, see kiirendab naha normaalse mikrofloora ja kaitsefunktsioonide taastumist. Eriti sobilik lamavate haigete hügieeniliseks puhastamiseks juhtudel kui pesemine on raskendatud. FRESH FOAM on dermatoloogiliselt testitud. **pH 5-6**


**KASUTAMINE:** kanda puhastatavale nahale, vajadusel kasutada selleks rätikut või pesukinnast, lasta toimida ning pühkida seejärel maha niiske rätiku või pesukindaga. Vahustamine toimub ilma survegaasita, mis on keskkonnale ohutu ega tekita nahal külmatunnet. CPNP ref nr **2347659**



500 ml / 5000 ml



Märkused

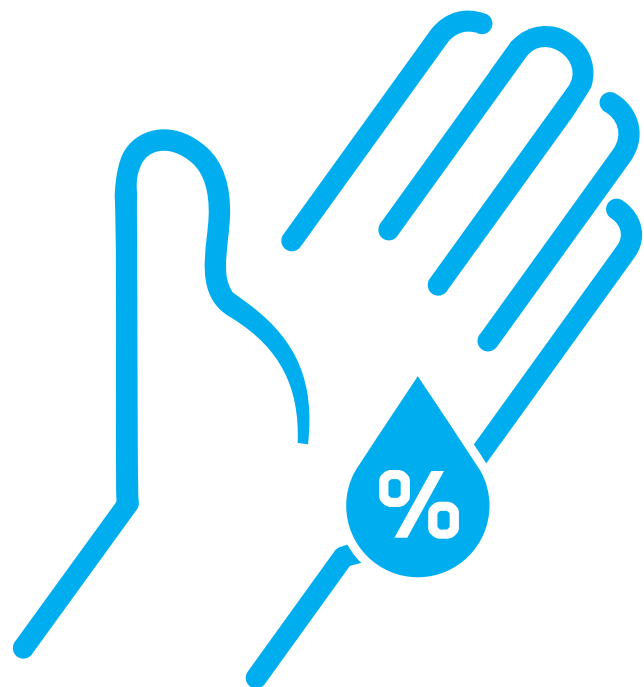

## KÄTE JA NAHA ANTISEPTIKA

## CHEMISEPT HAND DES

### Antiseptiline kätegeel

CHEMISEPT HAND DES on alkoholi baasil geeljas käte antiseptikum, mis on mõeldud kasutamiseks kõrgendatud hügieeninõuete tingimustes, kus käte antiseptika on tähtis ennetav abinõu infektsiooni vältimiseks. Toode omab laia bakteriitsidset (sh tuberkuloositekitaja), viirusiidset ja fungitsiidset toimet. Tootes CHEMISEPT HAND DES on kasutatud puhast ja vähelenduvat etüülalkoholi, et vältida hingamisteede ärritust, samuti sisaldab see komponente, millel on nahka pehmendav, niisutav ja kaitsev toime. CHEMISEPT HAND DES sobib nii hügieeniliseks kui ka kirurgiliseks käte antiseptikaks. Toimeaeg 30 sekundit. Toote remanentne toime kinnastatud kätele kestab 3 tundi. Kirurgiline käte antiseptika viiakse läbi 2 korda, kokku minimaalselt 1,5 minuti jooksul. Tootele ei ole lisatud värv- ega lõhnaaineid. CHEMISEPT HAND DES on dermatoloogiliselt testitud. Biotsiidi registreerimistunnistus nr 1180/13.

**KOOSTIS:** 100 g toodet sisaldab: etanool 73,5 g (toimeaine), nahka kaitsvad komponendid.

#### STANDARDID:

|         |          |          |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| EN 1500 | EN 12791 | EN 13624 | EN 13727 | EN 14348 | EN 14476 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|



100 ml / 500 ml / 1000 ml /  
1000 ml dispenso / 5000 ml



Märkused

## ALOE SKINSEPT

### Antiseptiline kätegeel aloe veraga

ALOE SKINSEPT on greibilõhnaline antiseptiline puhastusvahend kätele. Toodet võib kasutada vee ja seebi asemel või nende puudumisel kui käed ei ole silmnähtavalt määrdunud. Sisaldab nahka kaitsvat, niisutavat ja toitvat Aloe-Vera geeli. Peale kasutamist jääb käenahk pehme, siidine ning meeldiva lõhnaga. Toote geeli vorm tagab kasutamise mugavuse, efektiivsuse ja vähese lenduvuse. Tootes on kasutatud puhast ja vähelenduvat etüülalkoholi, et vältida hingamisteede ärritust. ALOE SKINSEPT on dermatoloogiliselt testitud. Biotsiidi registreerimistunnistus nr 0433/08.

**KOOSTIS:** 100g toodet sisaldab: etanool 72g (toimeaine), Aloe Barbadosis, lõhnaaine, limoneen, värvaine.

#### STANDARDID:

|         |          |          |
|---------|----------|----------|
| EN 1500 | EN 12791 | EN 13727 |
|---------|----------|----------|



75 ml / 500 ml /  
1000 ml



Märkused

# CHEMISEPT GEL

## Antiseptiline kätegeel

CHEMISEPT GEL on alkoholi baasil värvi- ja lõhnava käteantiseptikum, mis on välja töötatud professionaalseks kasutamiseks. Geel ei pritsi ega lendu ning seda on mugav kätele kanda. CHEMISEPT GEL jätab käed pehmeks ja mittekleepuvaks. CHEMISEPT GEL on laia bakteritsiidse ja fungitsiidse toimega, hävitab Gram-negatiivseid ja Gram-positiivseid baktereid (sh tuberkuloositekitaja, MRSA) ning seeni, desaktiveerib nii ümbrisega (sh HBV, HIV, HCV, Vaccinia) kui ka ümbriseta viiruseid (sh Adeno, Noro, Rota). CHEMISEPT GEL sobib nii hügieeniliseks kui ka kirurgiliseks käte antiseptikaks. Toimeaeg 30 sekundit. Toote remanentne toime kinnastatud kätele kestab 3 tundi. Kirurgiline käte antiseptika viiakse läbi 2 korda, kokku minimaalselt 1,5 minuti jooksul. CHEMISEPT GEL on dermatoloogiliselt testitud. Biotsiidi registreerimistunnistus nr 1690/18.

**KOOSTIS:** 100 g toodet sisaldab: etanooli 72,5 g (toimeaine), isopropanooli 7,5 g (toimeaine), nahka kaitsvad komponendid.

### STANDARDID:

|         |          |          |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| EN 1500 | EN 12791 | EN 13624 | EN 13727 | EN 14348 | EN 14476 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|



500 ml / 1000 ml /  
1000 ml dispenso / 5000 ml

# CHEMISEPT MED

## Käte antiseptikum

CHEMISEPT MED on alkoholi baasil käte antiseptikum kasutamiseks kõrgendatud hügieeninõuete tingimustes, kus käte antiseptika on tähtsaim profülaktiline abinõu infektsiooni vältimiseks. CHEMISEPT MED on laia bakteritsiidse ja fungitsiidse toimega, hävitab Gram-negatiivseid ja Gram-positiivseid baktereid (sh tuberkuloositekitaja, MRSA) ja seeni, desaktiveerib nii ümbrisega (sh HBV, HIV, HCV, Vaccinia) kui ka ümbriseta viiruseid (sh Adeno, Noro, Rota, Polio). CHEMISEPT MED on nahasõbralik, sisaldab pehmeid komponente, mis aitavad kiiresti taastada naha loomuliku mikrofloora, kaitsekihi ja niiskustasakaalu. CHEMISEPT MED sobib nii hügieeniliseks kui ka kirurgiliseks käte antiseptikaks. Toimeaeg 30 sekundit. Toote remanentne toime kinnastatud kätele kestab 3 tundi. Kirurgiline käte antiseptika viiakse läbi 2 korda, kokku minimaalselt 1,5 minuti jooksul. Tootele ei ole lisatud värv-eega lõhnaaineid. CHEMISEPT MED on dermatoloogiliselt testitud. Biotsiidi registreerimistunnistus nr 1691/18.

**KOOSTIS:** 100 g toodet sisaldab: etanooli 72,5 g (toimeaine), isopropanooli 7,5 g (toimeaine), nahka kaitsvad komponendid.

### STANDARDID:

|         |          |          |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| EN 1500 | EN 12791 | EN 13624 | EN 13727 | EN 14348 | EN 14476 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|



500 ml / 1000 ml /  
5000 ml



Märkused



Märkused

# CHEMISEPT WIPES

## Antiseptilised rätikud

CHEMISEPT WIPES on alkoholi baasil antiseptikumiga immutatud rätikud käte hügieeniliseks puhastamiseks. Toode on laia bakteritsiidse, viirusiidse ja fungitsiidse toimega. Toode on nahasõbralik ja sisaldab pantenooli, millel on nahka pehmendav, niisutav ja põletikuvastane toime. Sobib ka väikelaste käte puhastamiseks. CHEMISEPT WIPES on dermatoloogiliselt testitud. Biotsiidi registreerimistunnistus nr 0026/05.

**KOOSTIS:** 100 g desinfitseerimislahust sisaldab: etanooli 73,5 g (toimeaine), nahka kaitsvad komponendid (pantenool).



24 tk pakis



Märkused

# SWELL EXTRA CHG

## Antiseptiline vedelseep

SWELL EXTRA CHG on mõeldud kutsealaseks kasutamiseks meditsiinasutustes ja toiduainetetööstuse ettevõtetes ning kohtades, kus on vajalik sage hügieeniline kätepesu. Tootes on kasutatud nahasõbralikke pindaktiivseid aineid ning niisutavaid, pehmeid komponente, mis ennetavad naha kahjustumist, kuivamist ja ärrituvust ning tagavad naha niiskustasakaalu ja normaalse pH taseme. Kloorheksidiin diglükonaat, SWELL EXTRA CHG aktiivaine, omab laialdast antimikroobset toimet ning tagab pikaajalist kaitset.

**KASUTAMINE:** Antiseptiline kätepesu – niisketele kätele ja küünarvartele kanda 3 ml SWELL EXTRA CHG seepi ja pesta 30 sek. Erilist tähelepanu tuleb pöörata sõrmeotste, -vahede, randmete ja peopesade põhjalikule pesemisele. Peale toimeaega käed hoolikalt loputada ja kuivatada. Operatsioonieelne naha antiseptika viiakse läbi kaks korda, kasutades selleks 2 x 25 ml toodet. Soovituslik on protseduuri teha päev enne operatsiooni ja ka operatsiooni toimumise päeval. Peale pesu loputada patsiendi keha veega ja kuivatada puhta rätikuga. SWELL EXTRA CHG on dermatoloogiliselt testitud. Biotsiidi registreerimistunnistus nr 1517/16.

**KOOSTIS:** 100 g toodet sisaldab: D-glükoonhappe ja N,N"-bis(4-kloorofenüül)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraasetetradekaandiamidiini ühend (2:1) (CHDG) 2% (aktiivaine).

### STANDARDID:

|         |          |          |
|---------|----------|----------|
| EN 1499 | EN 13624 | EN 13727 |
|---------|----------|----------|



500 ml / 1000 ml



Märkused

# DESO SCRUB

## Antiseptiline vedelseep

DESO SCRUB on mõeldud kutsealaseks kasutamiseks meditsiini- ja veterinaarias, toiduainetetööstuses ning teistes ettevõtetes, kus on vajalik sagedane antiseptiline käte ja keha pesemine. Aktiivaine kloorheksidiin glükonaat tagab püsiva ja pikaajalise kaitse ning toote laialdase bakteriitsidse (sh MRSA) ja pärmseentevastase (sh C. albicans) toime. Antiseptiline käte pesu – niisketele kätele ja küünarvartele kanda 3 ml DESO SCRUB seepi ja pesta 30sek. Peale toimeaega käed põhjalikult loputada ja kuivatada. Preoperatiivne naha antiseptika viiakse läbi kaks korda, kasutades selleks 2x25 ml toodet. Peale pesu loputada patsiendi keha veega ja kuivatada puhta rätikuga. Biotsiidi registreerimistunnistus nr nr. 1326/15.

**KOOSTIS:** 100 g toodet sisaldab: D-glükoonhappe ja N,N"-bis(4-klorofenüül)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraasetatradekaandiamiidini ühend (2:1) (CHDG) 4% (aktiivaine).

### STANDARDID:

|         |         |          |          |
|---------|---------|----------|----------|
| EN 1499 | EN 1650 | EN 12791 | EN 13727 |
|---------|---------|----------|----------|



500 ml /  
5000 ml



Märkused

# CHEMISEPT FG

## Jalgade antiseptikum

CHEMISEPT FG on alkoholi baasil vahend jalgade antiseptikaks, kuid sobib ka alkoholi taluvate jalanõude kiireks desinfektsiooniks. Toode on laia fungitsiidse, bakteriitsidse ja viirusiidse toimega, väga efektiivne just dermatofüütide, pärm- ja hallitusseente suhtes. CHEMISEPT FG vähendab jalgade higistamist ning sellest tuleneva ebameeldiva lõhna tekkimist, samuti aitab likvideerida naha- ja küüneeseenhaiguste jaoks sobiva keskkonna. Tänu nahka kaitsvate komponentide sisaldusele aitab taastada naha kaitsefunktsioone. Tootes on kasutatud puhast ja vahelenduvat etüülalkoholi, et vältida hingamisteede ärritust. Toime- aeg 30 sekundit. Biotsiidi registreerimistunnistus nr 0039/05.

**KOOSTIS:** 100 g toodet sisaldab: etanool 62 g (toimeaine), C12-18-alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid (ADBAC (C12-18)) 0,125 g (toimeaine), C(C12-14)-alküüldimetüül(etüülbensüül)ammooniumkloriid (ADEBAC (C12-14)) 0,125 g (toimeaine), nahka kaitsvad komponendid.

### STANDARDID:

|         |          |
|---------|----------|
| EN 1275 | EN 13727 |
|---------|----------|



100 ml / 250 ml /  
1000 ml / 5000 ml



Märkused

# CHEMISEPT G

## Naha antiseptikum

CHEMISEPT G on alkoholi baasil vahend naha antiseptikaks. Toode on laia fungitsiidse, bakteriitsidse (sh tuberkuloositekitaja) ja viirusiidse toimega. Tootes CHEMISEPT G on kasutatud puhast ja vahelenduvat etüülalkoholi, et vältida hingamisteede ärritust. CHEMISEPT G sobib naha injektiooni- ja verevõetueelseks ning preoperatiivseks antiseptikaks. Toimeaeg 15-30 sekundit. Preoperatiivne naha antiseptika viiakse läbi 2 korda, kokku 3 minuti jooksul. Tootele ei ole lisatud värv- ega lõhnaaineid. Biotsiidi registreerimistunnistus nr 0045/05.

**KOOSTIS:** 100 g toodet sisaldab: etanool 75 g (toimeaine), C12-18-alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid (ADBAC (C12-18)) 0,05 g (toimeaine), C(C12-14)-alküüldimetüül(etüülbensüül)ammooniumkloriid (ADEBAC (C12-14)) 0,05 g (toimeaine).

### STANDARDID:

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| EN 12791 | EN 13624 | EN 13727 | EN 14348 | EN 14476 |
|----------|----------|----------|----------|----------|



100 ml / 250 ml / 500ml /  
1000 ml / 5000 ml



Märkused

# CHEMISEPT G COLOR

## Värvainega naha antiseptikum

CHEMISEPT G COLOR on alkoholi baasil värvainega vahend naha preoperatiivseks antiseptikaks. Toode on laia fungitsiidse ja bakteriitsidse toimega, hävitab Gram-positiivseid ja Gram-negatiivseid baktereid, sh. tuberkuloositekitajat ja seeni, desaktiveerib nii ümbrisega kui ka ümbri- seta viirusi (sh HBV, HIV, rota- ja adeno). Tootes CHEMISEPT G COLOR on kasutatud puhast ja vahelenduvat etüülalkoholi, et vältida hingamisteede ärritust. Peale naha antiseptikat jääb tänu tootes sisalduvale pikatoime- lisele desinfektandile püsima kolmeks tunniks mikroobide elutegevuseks sobimatu keskkond. Toimeaja möödudes taastub kiiresti naha normaalne mikrofloora. Toode on oranži värvi ja seetõttu on antiseptikumiga töödel- dud nahapind hästi nähtav. Biotsiidi registreerimistunnistus nr 0046/05.

**KOOSTIS:** 100 g toodet sisaldab: etanool 75 g (toimeaine), C12-18-alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid (ADBAC (C12-18)) 0,05 g (toimeaine), C(C12-14)-alküüldimetüül(etüülbensüül)ammooniumkloriid (ADEBAC (C12-14)) 0,05 g (toimeaine), värvaine.

### STANDARDID:

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| EN 12791 | EN 13624 | EN 13727 | EN 14348 | EN 14476 |
|----------|----------|----------|----------|----------|



1000 ml



Märkused

# CHEMISEPT HF

## Naha antiseptikum

CHEMISEPT HF on alkoholi baasil kloorheksidiini sisaldav vahend naha antiseptikaks. Toode on laia fungitsiidse, bakteriitsidse (sh tuberkuloositekitaja) ja viirusiidse toimega. CHEMISEPT HF-i kasutatakse naha injektsiooni- ja verevõetueelseks ning pre-operatiivseks antiseptikaks, samuti perifeerset ja tsentraalsete veenikanüülide korkide desinfitseerimiseks. Naha injektsiooni- ja verevõetueelse antiseptika toimeaeg 30 sekundit. Preoperatiivne naha antiseptika viiakse läbi 2 korda, kokku 3 minuti jooksul. Toote remanentne toime nahal kestab 24 tundi. Tootele ei ole lisatud värv- ega lõhnaaineid. Biotsiidi registreerimistunnistus nr **0448/09**.

**KOOSTIS:** 100g toodet sisaldab toimeaineid: etanool 70 g, D-glükoonhappe ja N,N-bis (4-klorofenüül)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraasetradekaandiamidiini ühend (2:1) (CHDG) 2g.

### STANDARDID:

|         |          |          |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| EN 1500 | EN 12791 | EN 13624 | EN 13727 | EN 14348 | EN 14476 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|



250 ml / 500 ml /  
1000 ml

# CHEMISEPT HF COLOR

## Kloorheksidiini ja värvainega naha antiseptikum

Sisaldab 2% kloorheksidiini. Pikaajaline antimikroobne toime. CHEMISEPT HF COLOR on etanooli baasil kloorheksidiini sisaldav värvainega vahend naha preoperatiivseks antiseptikaks ja teisteks kirurgilisteks protseduurideks. Chemisept HF Color on laia bakteriitsidse (k a MRSA), mükobakteritsidse (k a Mycobacterium avium and Mycobacterium terrae), fungitsiidse ja viirusiidse (k a HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia and Rota) toimega. Tootes CHEMISEPT HF COLOR on kasutatud puhast ja vähelenduvat etüülalkoholi, et vältida hingamisteede ärritust. Peale naha antiseptikat jääb tänu tootes sisalduvale kloorheksidiinile püsima pikaajaline mikroobide elutegevuseks sobimatu keskkond. Toimeaja möödudes taastub kiiresti naha normaalne mikrofloora. Kasutatakse peamiselt haiglates ning teistes tervishoiuasutustes: preoperatiivne naha antiseptika; naha antiseptika enne kirurgilisi protseduure; kanüülide ning kateetrite paigaldamisel. Biotsiidi registreerimistunnistus nr **2261/21**.

**KOOSTIS:** 100 g toodet sisaldab toimeaineid: etanool 70 g, D-glükoonhappe ja N,N-bis (4-klorofenüül)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraasetradekaandiamidiini ühend (2:1) (CHDG) 2g

### STANDARDID:

|         |          |          |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| EN 1500 | EN 12791 | EN 13624 | EN 13727 | EN 14348 | EN 14476 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|



1000 ml



Märkused




Märkused

# KUIDAS VALIDA ANTISEPTIKUMI?



| Toode                 | Kasutus-<br>ala | Vedelik /<br>geeljas | Aktiivaine                                    | Alkohol<br>g/100g | Värv- ja<br>lõhnaained          | Niisutus- ja<br>nahakaitse<br>komponendid |
|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| CHEMISEPT HAND<br>DES |                 | Geeljas              | Etanool                                       | 73,5              | Ei                              | Jah                                       |
| CHEMISEPT GEL         |                 | Geeljas              | Alkoholide segu                               | 80                | Ei                              | Jah                                       |
| CHEMISEPT MED         |                 | Vedelik              | Alkoholide segu                               | 80                | Ei                              | Jah                                       |
| ALOE SKINSEPT         |                 | Geeljas              | Etanool                                       | 72                | Aloe Vera<br>geel,<br>lõhnaaine | Jah                                       |
| CHEMISEPT FG          |                 | Vedelik              | Etanool +<br>kvaternaarsed<br>amooniumühendid | 62                | Piparmündi<br>lõhnaaine         | Jah                                       |
| CHEMISEPT G           |                 | Vedelik              | Etanool +<br>kvaternaarsed<br>amooniumühendid | 75                | Ei                              | Ei                                        |
| CHEMISEPT HF          |                 | Vedelik              | Etanool +<br>Kloorheksidiin 2%                | 70                | Ei                              | Ei                                        |
| CHEMISEPT G<br>COLOR  |                 | Vedelik              | Etanool +<br>kvaternaarsed<br>amooniumühendid | 75                | Toiduvärv                       | Ei                                        |
| CHEMISEPT HF<br>COLOR |                 | Vedelik              | Etanool +<br>Kloorheksidiin 2%                | 70                | Toiduvärv                       | Ei                                        |

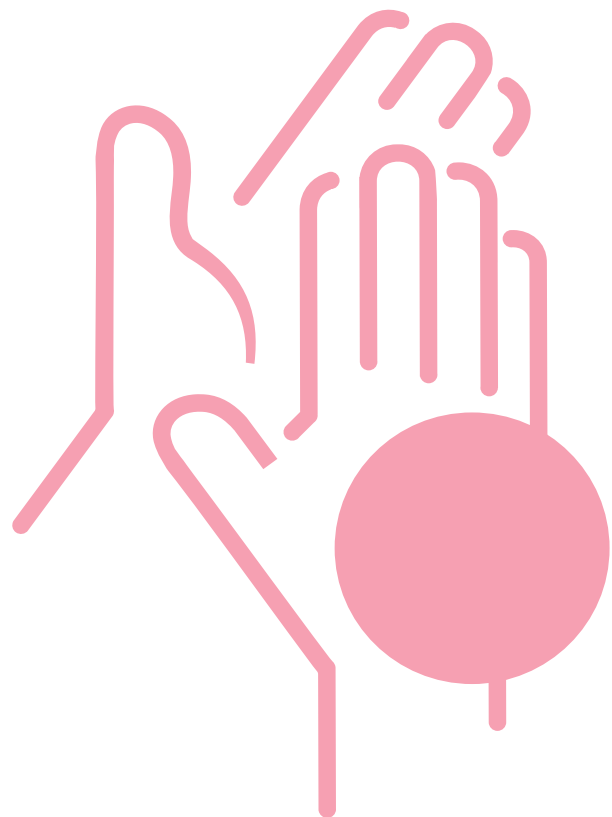

# NAHAHOOLDUS

## BIOCARE

Niisutav ja hooldav kätekreem tundlikule nahale

BIOCARE on hüaluroonhappega kätekreem, mis niisutab ja toidab nahka. Tootes sisalduv naturaalsete õlide kompleks koos A, E ja C vitamiiniga rahustab ärritunud nahka ja suurendab selle kaitsevõimet. Hüaluroonhape ning urea derivaat tagavad maksimaalse niisutuse ka tundlikule, kuivale ja karedale nahale, jättes selle pehmeks ja siidiseks. Kreem on õrnalt lõhnastatud. pH **5,5-6,5**. CPNP ref nr **2149125**



50 ml  
200 ml  
250 ml  
500 ml



Märkused

## BIOCARE LIGHT

Ihupiim sheavõiga igale nahatüübile

BIOCARE LIGHT on koostiselt kerge ihupiim naha igapäevaseks hooldamiseks. Sheavõi niisutab, pehmendab ning toidab nahka. BIOCARE LIGHT imendub kiiresti ega jäta nahka rasvaseks. Toode on dermatoloogiliselt testitud ning sobib ka tundlikule nahale. Toode on parfüümivaba. pH **5-6**. CPNP ref nr **4461596**



500 ml



Märkused

## BIOCARE DAILY

Keha- ja kätekreem sheavõiga igapäevaseks kasutuseks

BIOCARE DAILY on 25%-lise rasvasisaldusega nahka toitev ja niisutav kreem kätele ja kehale, mis imendub kiirelt ega jäta nahka rasvaseks. Sheavõis sisalduvad vitamiinid A ja E toidavad, niisutavad ja pehmen-davad nahka ning tõstavad selle kaitsevõimet. Kreem sobib hästi kasutamiseks tervishoiuasutustes, kus sagedane käte pesemine ja anti-septika võib kahjustada naha loomuliku kaitsekihti. BIOCARE DAILY on eriti sobilik kuiva ja tundliku nahaga inimestele. Toode on parfüümivaba. pH **5-6**. CPNP Ref: **4461609**



100ml  
200 ml  
500 ml



Märkused

# BIOCARE PROTECT

Kaitsekreem sheavõiga igapäevaseks kasutuseks

BIOCARE PROTECT on 35%-lise rasvasisaldusega niisutav kreem kuivale ja tundikule nahale. Sheavõis sisalduvad vitamiinid A ja E toidavad, niisutavad ja pehmenndavad nahka. Kreem aitab säilitada naha niiskustasakaalu ning tõstab naha kaitsevõimet, mille tõttu sobib see hästi kasutamiseks tervishoiuasutustes, kus sagedane käte pesemine ja antiseptika võib kahjustada naha loomulikku kaitsekihti. Toode on parfüümivaba. pH 5-6. CPNP ref nr **4461621**



Märkused

# BIOCARE INTENSE

Niisutav ja kaitsev kreem kuivale nahale

BIOCARE INTENSE on eriti kõrge rasvasisaldusega kreem, mis pakub pikajalist niisutust ning kaitset kuiva ja ärritunud naha korral. BIOCARE INTENSE sisaldab E-vitamiini, mis pehmenndab ja rahustab ärritunud nahka ning toetab nahalõhede paranemisprotsessi. Vaseliin moodustab naha pinnale kaitsekihi, mis aitab ära hoida niiskuskadu. BIOCARE INTENSE sobib ka tundikule nahale. Toode on parfüümivaba. pH 4,8-5,5. CPNP ref nr **4461631**



Märkused

# DERMALINE-1

Parfüümivaba naha kaitsekreem

DERMALINE-1 on tsinkoksiidil (15%) ning niisutavatel komponentidel põhinev kaitsekreem õrna ja tundliku naha hooldamiseks. Tsinkoksiid moodustab naha pinnale kaitsva barjääri, mis tõrjub päikese UV-kiirgust ega lasa tuulel ning külmal nahka mõjutada. Ka haudunud ning ärritunud naha korral pakub tsinkoksiid tõhusat kaitset ning soodustab selle paranemisprotsesse. DERMALINE-1 sobib kasutamiseks kogu kehal, ka eriti tundlikes kehapiirkondades, mis vajavad leevendust ning naha loomulike kaitsefunktsioonide taastamist. DERMALINE-1 on abiks mähkmeleõbe, -ärrituse, uriinipidamatuse ning voodihaigete nahaprobleemide korral. Tootes on 25,5% nahka kaitsvaid lipide ehk rasvaineid. DERMALINE-1 on parfüümivaba ning dermatoloogiliselt testitud. CPNP ref nr **1611960**



Märkused

# COOLING GEL

Jahutav massaažigeel

COOLING GEL on jahutav massaažigeel, mis tagab optimaalse libisemise ka pikaajalise massaaži korral. Massaažigeel sisaldab jahutavat mentooli-, eukalüpti- ja kamprikooreõli, et vähendada lihasingeid ja tagada lõõgastunud olek kogu kehas. Lisaks jahutavale tundele mõjub tootes sisalduv mentool ka rahustava, lõdvestava ja sügavat hingamist soodustava aroomiteraapia komponendina. Tootes sisalduv kampriõli tõstab meeleolu ja vabastab pinged ning on valu, põletiku ja nahaärrituse leevendajaks. Eukalüptiõli parandab naha verevarustust ning omab ka sügavat ja rahulikku und soodustavat aroomiteraapia komponenti. Massaažigeelis sisalduv pantenool on põletikuvastase ja nahka rahustava toimega ning aitab lihastel lõdvestuda. COOLING GEL sobib hästi kasutamiseks massaaži protseduuril voodihaigetel sundasendist tingitud pingete leevendamiseks õlgadel, kaelal, kätel ja jalgadel.

CPNP ref nr **3923174**



Märkused



# PINDADE DESINFEKTSIOON

## BACTICID

### Alkoholi baasil kiirdesinfektsioonivahend meditsiiniseadmetele

BACTICID on alkoholi baasil valmislahus alkoholi taluvate pindade kiirdesinfektsiooniks. BACTICID on laia bakteritsiidse (sh tuberkuloositekitaja), viirusiidse ja fungitsiidse toimega. Toode kantakse ühekordsele rätikule ja seejärel puhastatavale pinnale. Rätikuga pühkimisel jälgida, et kogu töödeldav pind oleks desinfektsioonivahendiga kaetud minimaalselt 30 sekundi jooksul. Biotsiidi registreerimistunnistus nr 2054/20.

**KOOSTIS:** 100 g toodet sisaldab: etanool 72 g (toimeaine), C12-18-alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid (ADBAC (C12-18)) 0,0125 g (toimeaine), C(C12-14)-alküüldimetüül(etüülbensüül)ammooniumkloriid (ADEBAC (C12-14)) 0,0125 g (toimeaine).

#### STANDARDID:

|          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| EN 13624 | EN 13697 | EN 13727 | EN 14348 | EN 14476 | EN 14561 | EN 14562 |
| EN 14563 | EN 16777 | EN 17387 | EN 1275  | EN 1276  | EN 1650  |          |



500 ml /  
1000 ml / 5000 ml



Märkused



## BACTICID AF

### Alkoholi baasil kiirdesinfektsioonivahend meditsiiniseadmetele

BACTICID AF on alkoholi baasil valmislahus alkoholi taluvate pindade kiirdesinfektsiooniks. BACTICID AF on laia bakteritsiidse (sh tuberkuloositekitaja), viirusiidse ja fungitsiidse toimega. Toode kantakse ühekordsele rätikule ja seejärel puhastatavale pinnale. Rätikuga pühkimisel jälgida, et kogu töödeldav pind oleks desinfektsioonivahendiga kaetud minimaalselt 30 sekundi jooksul. BACTICID AF sobib kasutamiseks ka toiduainetööstuses. Biotsiidi registreerimistunnistus nr 1889/20.

**KOOSTIS:** 100 g toodet sisaldab: etanool 57 g (toimeaine), isopropanool 6 g (toimeaine).

#### STANDARDID:

|          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| EN 13624 | EN 13697 | EN 13727 | EN 14348 | EN 14476 | EN 14561 | EN 14562 |
| EN 14563 | EN 16615 | EN 16777 | EN 17387 | EN 1276  | EN 1650  |          |



1000 ml / 5000 ml



Märkused

# BACTICID WIPES

Alkoholi baasil kiirdesinfektsioonivahendiga immutatud rätikud meditsiiniseadmetele

BACTICID WIPES on alkoholi baasil kiirdesinfektsioonivahendiga immutatud rätikud alkoholi taluvate pindade ja mitteinvasiivsete meditsiiniseadmete desinfektsiooniks. Toode on laia bakteritsiidse (sh tuberkuloositekitaja), virutsiidse ja fungitsiidse toimega. Rätikuga pühkimisel jälgida, et kogu töödeldav pind oleks desinfektsioonivahendiga kaetud minimaalselt 30 sekundi jooksul. Biotsiidi registreerimistunnistus nr **2055/20**.

**KOOSTIS:** 100 g desinfitseerimislahust sisaldab: etanool 72 g (toimeaine), C12-18-alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid (ADBAC (C12-18)) 0,0125 g (toimeaine), C(C12-14)-alküüldimetüül(etüülbensüül)ammooniumkloriid (ADEBAC (C12-14)) 0,0125 g (toimeaine).

## STANDARDID:

|          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| EN 13624 | EN 13697 | EN 13727 | EN 14348 | EN 14476 | EN 14561 | EN 14562 |
| EN 14563 | EN 16615 | EN 16777 | EN 1275  | EN 1276  | EN 1650  |          |



100 tk / 150 tk / 600 tk



Märkused

# BACTICID AF WIPES

Alkoholi baasil kiirdesinfektsioonivahendiga immutatud rätikud meditsiiniseadmetele

BACTICID WIPES AF on alkoholi baasil kiirdesinfektsioonivahendiga immutatud rätikud alkoholi taluvate pindade ja mitteinvasiivsete meditsiiniseadmete desinfektsiooniks. Toode on laia bakteritsiidse (sh tuberkuloositekitaja), virutsiidse ja fungitsiidse toimega. Rätikuga pühkimisel jälgida, et kogu töödeldav pind oleks desinfektsioonivahendiga kaetud minimaalselt 30 sekundi jooksul.

BACTICID WIPES AF sobib kasutamiseks ka toiduainetööstuses.

**KOOSTIS:** 100 g desinfitseerimislahust sisaldab: etanool 57 g, isopropanool 6 g (toimeained).

## STANDARDID:

|          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| EN 13624 | EN 13697 | EN 13727 | EN 14348 | EN 14476 | EN 14561 | EN 14562 |
| EN 14563 | EN 16615 | EN 16777 | EN 17387 | EN 1276  | EN 1650  |          |



100 tk / 150 tk



Märkused

# STERISEPT WIPES

Alkoholivaba desinfektsioonivahendiga immutatud rätikud meditsiiniseadmetele

STERISEPT WIPES rätikud on immutatud alkoholivaba desinfektsioonivahendiga. Tänu pindaktiivsete ainete sisaldusele on tootel väga head puhastavad omadused. Rätikud sobivad kõikide veega töötlemist taluvate pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks ega muuda pindade visuaalset väljanägemist. Niisutatud rätikud on materjalisõbralikud ja mugavad kasutada. STERISEPT WIPES rätikud on bakteritsiidse, virutsiidse, fungitsiidse ja sporitsiidse toimega.

**KOOSTIS:** 100 g desinfitseerimislahust sisaldab: Didetsüüldimetüülammooniumkloriid 0,45 g (toimeaine), N-(3-aminopropüül)-N-dodetsüülpropaan-1,3-diamiin 0,45 g (toimeaine), mitteionogeensed tensiidid, pH regulaator, säilitusaine.

## STANDARDID:

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| EN 13624 | EN 13697 | EN 13704 | EN 13727 | EN 14348 | EN 14476 |
| EN 14561 | EN 14562 | EN 14563 | EN 16615 | EN 16777 | EN 17387 |



120 tk



Märkused

# STERISEPT READY TO USE

Alkoholivaba meditsiiniseadmete kiirdesinfektsiooni- ja puhastusvahend

STERISEPT READY TO USE on alkoholivaba kiirdesinfektsiooni- ja puhastusvahend invasiivsete ja mitte-invasiivsete meditsiiniseadmete ning alkoholile tundlike pindade desinfektsiooniks ja puhastamiseks. Toode ei sisalda alkohole, aldehüüde ega biguaanide (PHMB) ning sobib tervishoiuasutustes kõikide veepeesu taluvate pindade puhastamiseks. Tänu spetsiaalsele koostisele omab toode häid desinfitseerivaid ja ka puhastavaid omadusi. STERISEPT READY TO USE sobib kasutamiseks järgmiste pindade ja instrumentide töötlemiseks: roostevaba teras, klaas, alumiinium, vask, messing, keraamika, PVC, kumm, plastik, silikoon, nahkpinnad ning akrüül- ja pleksi-klaas. Biotsiidi registreerimistunnistus nr **1892/20**.

**KOOSTIS:** 100 g toodet sisaldab: Didetsüüldimetüülammooniumkloriid 0,45 g (toimeaine), N-(3-aminopropüül)-N-dodetsüülpropaan-1,3-diamiin 0,45 g (toimeaine), mitteionogeensed tensiidid, pH regulaator, säilitusaine.

## STANDARDID:

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| EN 13624 | EN 13697 | EN 13704 | EN 13727 | EN 14348 | EN 14476 |
| EN 14561 | EN 14562 | EN 14563 | EN 16615 | EN 16777 | EN 17387 |



750ml/

1000 ml / 5000 ml



Märkused

# CHEMIPHARM DES NEW

## Desinfitseeriva toimega üldpuhastusvahend

CHEMIPHARM DES NEW on desinfitseeriv leeliseline lõhnatu kontsentreeritud pesuvahend pindadele, mis taluvad veega töötlemist. Väga efektiivne dermatofüütide, pärm- ja hallitusseente suhtes. Kasutatakse kõikide üldkasutatavate sauna-, duši- ja basseiniruumide ning vannide puhastamiseks ja desinfitseerimiseks, samuti sokkide ja pesu pesemiseks naha- ja küüne-seenhaiguste korral. CHEMIPHARM DES NEW on laia antimikroobse toimega, hävitab Gram-positiivseid ja Gram-negatiivseid baktereid, seeni ning inaktiveerib viiruseid. Kasutuskontsentratsioonid: 0,3-1%, toimeajad 5-30 minutit. pH 11-12. Biotsiidi registreerimistunnistus nr **0037/05**.

**KOOSTIS:** 100 g toodet sisaldab: C12-18-alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid (ADBAC (C12-18)) 3,5 g (toimeaine), C(C12-14)-alküüldimetüül (etüülbensüül)ammooniumkloriid (ADEBAC (C12-14)) 3,5 g (toimeaine), mitteionogeensed tensiidid 5-15 g, kompleksimoodustaja.

### STANDARDID:

|         |         |          |          |          |
|---------|---------|----------|----------|----------|
| EN 1040 | EN 1275 | EN 13624 | EN 13727 | EN 14476 |
|---------|---------|----------|----------|----------|



1000 ml / 5000 ml



Märkused

# SMELL NET

## Lõhna eemaldava toimega desinfitseeriv puhastusvahend

SMELL NET on vedel piparmündilõhnaline kontsentraat pindade ja tarvikute desinfitseerivaks puhastamiseks ja ebameeldivate lõhnade eemaldamiseks. Tootte kokkupuutel uriiniga toimub keemiline reaktsioon, mille tulemusena kaob uriini ebameeldiv lõhn. SMELL NET on mõeldud kasutamiseks tervishoiuasutustes, lasteasutustes ja kõikjal mujal, kus on vajalik desinfitseerimine, pesemine ja uriini lõhna eemaldamine. Sobilik ka koduses majapidamises lemmiklooma puuride puhastamiseks ja ebameeldivate lõhnade eemaldamiseks. SMELL NET on bakteritsiidse, fungitsiidse ja viiruseid inaktiveeriva toimega. Toimeajad: igapäevane puhastamine ja desinfitseerimine 1% lahusega - 5 minutit, HBV ja HIV profülaktika 2% töölahusega - 15 min. pH 1-2. Biotsiidi registreerimistunnistus nr **0035/05**.

**KOOSTIS:** 100 g toodet sisaldab: C12-18-alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid (ADBAC (C12-18)) 1,25 g (toimeaine), C(C12-14)-alküüldimetüül (etüülbensüül)ammooniumkloriid (ADEBAC (C12-14)) 1,25 g (toimeaine), anorgaaniline hape < 5 g, korrosiooni inhibiitor, lõhnaaine.

### STANDARDID:

|          |          |
|----------|----------|
| EN 13624 | EN 17327 |
|----------|----------|



1000 ml / 5000 ml



Märkused

# CLEAN FOAM

## Desinfitseeriv puhastusvaht pindadele

CLEAN FOAM on kasutusvalmis desinfitseeriv puhastusvaht mitte-invasiivsete medistiiniseadmete ja teiste alkoholi suhtes tundlike pindade puhastamiseks. CLEAN FOAM ei sisalda alkohole, aldehüüde ega PHMB (biguaanid) ja on kasutatav kõigi vett taluvate pindade puhastamiseks. Toode kantakse pinnale vahu vormis, mis teeb tema kasutamise mugavaks ja ökonoomseks. CLEAN FOAM on materjalisõbralik, lisaks omab bakteritsiidset ja fungitsiidset toimet, hävitab Gram-positiivseid ja Gram-negatiivseid baktereid. Toode toimib samuti ümbrisega viiruste suhtes (k.a HBV, HIV, HCV). CLEAN FOAM sobib kasutamiseks haiglates, hambaravikliinikutes, hooldekodudes, laboratooriumites, psühhoterapias, perearstikeskustes jm. Vahustamine pinnale toimub ilmasurvegaasita, mis on kasutajale ja keskkonnale ohutu.

**KOOSTIS:** 100g toodet sisaldab järgmisi toimeaineid: C12-18-alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid (ADBAC (C12-18)) 0,125g; C(C12-14)-alküüldimetüül(etüülbensüül)ammooniumkloriid (ADEBAC (C12-14)) 0,125g

### STANDARDID:

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| EN 13624 | EN 13727 | EN 14476 |
|----------|----------|----------|



750 ml/  
1000 ml / 5000 ml



CE  
0537

Märkused

# CHLORINEX-60

## Klooritabeltid (1,5 g aktiivkloori)

CHLORINEX-60 on vees täielikult lahustuvad, tõhusalt desinfitseerivad naatriumdikloroisotsüanuraati sisaldavad tabletid. Naatriumdikloroisotsüanuraat on tänu oma unikaalsele toimemehanismile, tavalise hüpokloriit sisaldava tootega võrreldes, kuni kakskümmend korda tõhusam. Tablett aktiivkloori sisaldusega 1,5 grammi annab lahustatuna vees täpselt kindlaksmääratud kontsentratsiooniga tugevatoimelise desinfektsioonilahuse, mis omab bakteritsiidset (k.a. tuberkuloosi tekitaja), fungitsiidset, viirusiivset ja sporitsiidset toimet. Töölahuse pH 6-7. Biotsiidi registreerimistunnistus nr **0029/05**.

**KOOSTIS:** naatriumdikloroisotsüanuraat 75%. 1 tablett kaaluga 3,3 g sisaldab 1,5 g aktiivkloori.

### STANDARDID:

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| EN 13624 | EN 13697 | EN 13704 | EN 13727 | EN 14348 |
| EN 14476 | EN 17126 | EN 1276  | EN 1650  |          |



300 tk



KÕRGASTE  
DESINFEKTSIOON

Märkused

# STERISEPT PLUS

Meditsiiniseadmete pindade desinfektsiooni- ja puhastusvahend

STERISEPT PLUS on vedel kontsentratsioon mitteinvasiivsete meditsiiniseadmete ja veepesu taluvate pindade desinfitseerimiseks ja pesuks. Toode on ette nähtud kutsealaseks kasutamiseks.

Sterisept Plusil on nii puhastavad kui ka desinfitseerivad omadused, tänu millele sobib see kasutamiseks tervishoiuasutustes kõikidel pindadel. STERISEPT PLUS on sobilik kasutamiseks nii haiglates, toidu- ja ravimite tööstuses, veterinaarias, laborites, hambaravikliinikutes kui ka teistes tervishoiuasutustes. Toode on laia bakteritsiidse (sh tuberkuloositekitaja), viirusiidsed ja fungitsiidse toimega, hävitab Gram- negatiivseid ja Gram-positiivseid baktereid, sh. tuberkuloosi tekitajat ja seeni, desaktiveerib nii ümbrisega kui ka ümbrise viirusi (sh HBV, HIV, rota- ja adeno). Biotsiidi registreerimistunnistus nr 1891/20.

**Tähelepanu!** STERISEPT PLUS ei sobi kasutamiseks koos aldehüüdidebaasil toodetega.

**KOOSTIS:** 100 g toodet sisaldab toimeaineid: Didecyl-Dimethyl-Ammonium Chloride (DDAC) 12,5g ; N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 12,5g

**STANDARDID:**

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| EN 13624 | EN 13697 | EN 13727 | EN 14348 |
| EN 14476 | EN 14561 | EN 16615 | EN 17387 |



1000 ml / 5000 ml



Märkused

# KASUTUSÕPETUS

Pindade desinfektsiooni- ja puhastusvahendite kasutusest saab põhjaliku ülevaate Chemi-Pharmi tootevideodest.

## BACTICID AF



Eestikeelne



Inglisekeelne



## BACTICID AF WIPES



Eestikeelne



Inglisekeelne



## STERISEPT READY TO USE



Eestikeelne



Inglisekeelne



## STERISEPT WIPES



Eestikeelne




Inglisekeelne



## KUIDAS VALIDA PINDADE DESINFEKTSIOONIVAHENDIT?

| Toode                          | Valmislahus / kontsentraat | Aktiivaine                                | Puhastusomadus |  | Toime haigustekitajatesse ja toimeaeg                                |                | Kasutusala ja materjalisobivus                                                                                                             |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------|--|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BACTICID / WIPES               | Valmislahus                | Etanool                                   | Ei             |  | Bakteritsiidne (k.a MRSA, VRE)                                       | 30 sek         | Metallid, pvc, linoleum, keraamilised plaadid ja plastikud, klaaspinnad                                                                    |
|                                |                            |                                           |                |  | Mükobakteritsiidne (k.a Mycobacterium avium ja Mycobacterium terrae) | 30 sek         |                                                                                                                                            |
|                                |                            |                                           |                |  | Kõik ümbrisega viirused (HBV, HIV, HCV)                              | 30 sek         |                                                                                                                                            |
|                                |                            |                                           |                |  | Ümbriseta viirused (Adeno-, Noro- Polio-, Rota)                      | 15-30 sek      |                                                                                                                                            |
|                                |                            |                                           |                |  | Fungitsiidne ja pärmseentevastane toime                              | 30 sek         |                                                                                                                                            |
| BACTICID AF / WIPES            | Valmislahus                | Alkoholide segu                           | Ei             |  | Bakteridsiidne (k.a MRSA, VRE)                                       | 30 sek         | Metallid, pvc, linoleum, keraamilised plaadid ja plastikud klaaspinnad                                                                     |
|                                |                            |                                           |                |  | Mükobakteritsiidne (k.a Mycobacterium avium ja Mycobacterium terrae) | 30 sek         |                                                                                                                                            |
|                                |                            |                                           |                |  | Kõik ümbrisega viirused (HBV, HIV, HCV)                              | 15 sek         |                                                                                                                                            |
|                                |                            |                                           |                |  | Ümbriseta viirused (Adeno-, Noro- Polio- ja Vacciniaviirus)          | 30 sek         |                                                                                                                                            |
|                                |                            |                                           |                |  | Fungitsiidne ja pärmseentevastane toime                              | 30 sek         |                                                                                                                                            |
| STERISEPT READY TO USE / WIPES | Valmislahus                | Kvaternaarsed ammooniumühendid ja amiinid | Jah            |  | Bakteridsiidne (k.a MRSA, VRE) ja pärmseened                         | 1 min          | Metallid, pvc, linoleum, keraamilised plaadid, nahkpinnad, tekstiil, kangas, plastik, kumm, silikoon, klaaspinnad, akrüül- ja pleksiklaas  |
|                                |                            |                                           |                |  | Ümbrisega (HBV, HIV, HCV) ja ümbriseta (Rota-, Noro) viirused        | 30 sek         |                                                                                                                                            |
|                                |                            |                                           |                |  | Mükobakteritsiidne (k.a Mycobacterium avium ja Mycobacterium terrae) | 5 min          |                                                                                                                                            |
|                                |                            |                                           |                |  | Fungitsiidne ja pärmseentevastane toime                              | 1 min          |                                                                                                                                            |
|                                |                            |                                           |                |  | Hallitusseened                                                       | 10 min         |                                                                                                                                            |
|                                |                            |                                           |                |  | Clostridium difficile                                                | 15 min         |                                                                                                                                            |
| CLEAN FOAM                     | Valmislahus                | Kvaternaarsed ammooniumühendid            | Jah            |  | Bakteritsiidne                                                       | 1 min          | Metallid, pvc, linoleum, keraamilised plaadid, nahkpinnad, tekstiil, kangas, plastik, kumm, silikoon, klaaspinnad, akrüül- ja pleksiklaas  |
|                                |                            |                                           |                |  | Ümbrisega viirused                                                   | 2 min          |                                                                                                                                            |
| CHEMIPHARM DES NEW             | Kontsentraat               | Kvaternaarsed ammooniumühendid            | Jah            |  | Bakteritsiidne                                                       | 5 min – 10 min | Metallid, pvc, linoleum, keraamilised plaadid, nahkpinnad, tekstiil, kangas, plastik, kumm, silikoon, klaaspinnad, akrüül- ja pleksiklaas  |
|                                |                            |                                           |                |  | Ümbrisega (HBV, HIV, HCV) viirused                                   | 5 min – 10 min |                                                                                                                                            |
|                                |                            |                                           |                |  | Dermatofüüdid, pärm- ja hallitusseened                               | 5 min – 10 min |                                                                                                                                            |
|                                |                            |                                           |                |  | Fungitsiidne                                                         | 5 min – 10 min |                                                                                                                                            |
| SMELL NET                      | Kontsentraat               | Kvaternaarsed ammooniumühendid            | Jah            |  | Bakteritsiidne                                                       | 5 min – 15 min | Metallid, pvc, linoleum, keraamilised plaadid, nahkpinnad, tekstiil, kangas, plastik, kumm, silikoon, klaaspinnad, akrüül- ja pleksiklaas  |
|                                |                            |                                           |                |  | Ümbrisega viirused                                                   | 5 min – 15 min |                                                                                                                                            |
|                                |                            |                                           |                |  | Seenid hävitav toime                                                 | 5 min – 15 min |                                                                                                                                            |
| STERISEPT PLUS                 | Kontsentraat               | Kvaternaarsed ammooniumühendid ja amiinid | Jah            |  | Bakteritsiidne (k.a MRSA, VRE)                                       | 5 min – 15 min | Metallid, pvc, linoleum, keraamilised plaadid, nahkpinnad, tekstiil, kangas, plastik, kumm, silikoon, klaaspinnad, akrüül- ja pleksiklaas. |
|                                |                            |                                           |                |  | Mükobakteritsiidne (k.a Mycobacterium avium ja Mycobacterium terrae) | 5 min – 15 min |                                                                                                                                            |
|                                |                            |                                           |                |  | Kõik ümbrisega viirused (HBV, HIV, HCV)                              | 5 min – 15 min |                                                                                                                                            |
|                                |                            |                                           |                |  | Ümbriseta viirused (Rota)                                            | 5 min – 15 min |                                                                                                                                            |
|                                |                            |                                           |                |  | Fungitsiidne ja pärmseentevastane toime                              | 5 min – 15 min |                                                                                                                                            |
|                                |                            |                                           |                |  |                                                                      |                | Ei sobi kasutamiseks polükarbonaadist ja lakitud pindadel.                                                                                 |

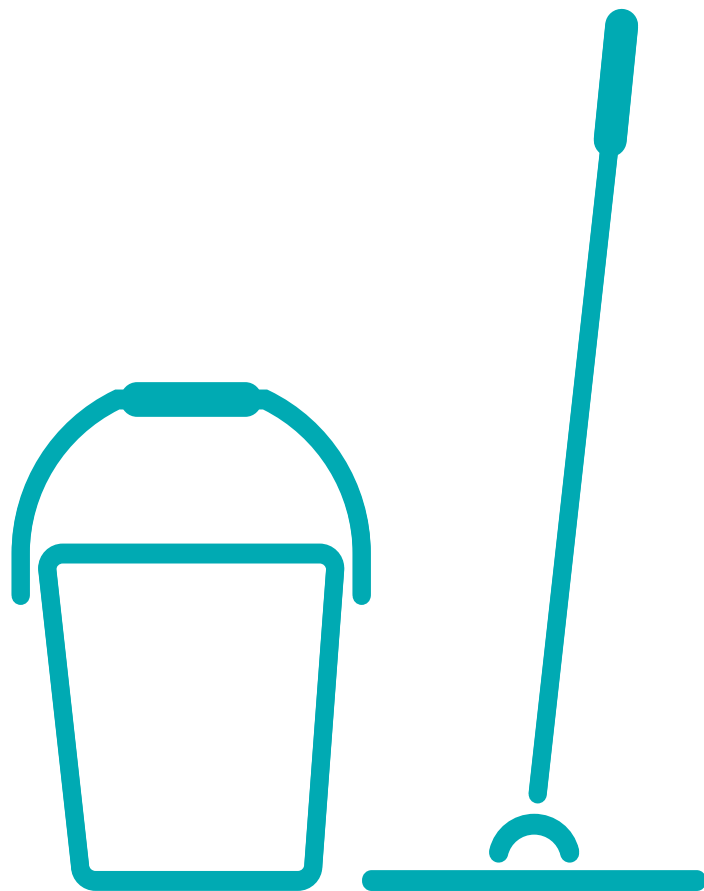

## ÜLDPUHASTUS

## NEUTRAL CLEANER

### Neutraalne üldpuhastusvahend

NEUTRAL CLEANER on kontsentreeritud neutraalne üldpuhastusvahend kõikide veega töötlemist taluvate pindade puhastamiseks. Tänu neutraalsele pH tasemele sobib NEUTRAL CLEANER-i töölahus hästi vahatatud põrandate puhastamiseks, samuti värvitud pindade ja linoleumiga kaetud põrandate igapäevaseks hoolduseks. Toode ei sisalda abrasiivseid koostisosi, mis kahjustaksid vahatatud pindade läiget või värvitud pindasid. Plekieemalduseks võib kasutada ka kontsentrati, kuid töötlemise järgselt tuleb sel juhul pinnad loputada. Sobilik kasutamiseks ka toiduainetööstuses. Kontsentradi pH 6,5-7,5.

**KASUTAMINE:** Igapäevane pindade hoolduspesu: 1 – 2,5 ml/5 l vett. Vähemäärduvad pinnad ja põrandapesumasin: 2,5 ml/5 l vette. Keskmiselt määrduvad pinnad: 5 ml/5 l vette. Põhipuhastus, tugevalt määrduvad pinnad: 10 – 20 ml/5 l vette. Mustuseplekkide eemaldamine: võib kasutada ka kontsentradi. Põhipuhastusel ja plekkide eemaldamisel vajalik loputamine. Pesulahus kantakse põrandale mopi või pihusti abil. Tugevalt määrduvad pindade korral lastakse lahusel mõjuda mõne minuti. Töölahused valmistatakse vahendi lahustamisel vees (+20 – +40 C). Valmis töölahus säilib suletult 14 ööpäeva, kasutusel olev lahust 1 ööpäev.



1000 ml / 5000 ml



Märkused

## CLEAN FEEL

### Üldpuhastusvahend

CLEAN FEEL on kontsentreeritud leeliseline üldpuhastusvahend kõikidele veega töötlemist taluvatele pindadele. Töölahus sobib kivipõrandate, linoleum- ja värvitud pindade ning keraamiliste plaatide igapäevaseks puhastamiseks. Eemaldab pindadelt rasva, õli ning muu kinnitunud mustuse, jätab ruumidesse värske lõhna. Leeliselise pH taseme tõttu ei sobi CLEAN FEEL kasutamiseks vahatatud pindadel. Tugevalt määrduvad pindade puhastamiseks ja plekieemalduseks võib kasutada ka kontsentrati, kuid töötlemise järgselt tuleb sel juhul pinnad loputada. Toode on sobilik kasutamiseks ka toiduainetööstuses. Kontsentradi pH 10-11.

**KASUTAMINE:** Igapäevane pindade hoolduspesu: 1 – 2,5 ml/5 l vett. Vähemäärduvad pinnad: 2,5 ml/5 l vett. Keskmiselt määrduvad pinnad: 5 ml/5 l vett. Põhipuhastus tugevalt määrduvad pindadele: 10 – 20 ml/5 l vett. Plekieemalduseks võib kasutada ka kontsentradi. Põhipuhastusel ja plekkide eemaldamisel on vajalik loputamine. Töölahused valmistatakse vahendi lahustamisel vees (+20 – +40 C). Valmis töölahus säilib suletult garantiiaja lõpuni, kasutusel olev lahust 1 ööpäev.



1000 ml / 5000 ml



Märkused

# WIPER EXTRA

## Tugevatoimeline vaha- ja rasvaeemaldusvahend

WIPER EXTRA on tugevatoimeline leeliseline rasvaeemaldusvahend, mis lahustab efektiivselt rasva, tahma ja kuivanud mustust ning põrandavaha. Kasutatakse nii metalliseeritud kui ka metalliseerimata vahade eemaldamiseks põrandatelt. Kuna WIPER EXTRA on tugevalt leeliseline, ei sobi kasutada naturaalsest materjalist põrandate puhastamiseks. Tensiidid on bioloogiliselt lagunevad, töölahuse võib valada kanalisatsiooni. Kontsentraadi pH 13.

**KASUTAMINE:** Igapäevane pindade hoolduspesu: 1 – 2 ml/5 l vette. Vähemäärdund pinnad 2-5ml/5l vette. Keskmiselt määrdund põrandad: 5-10ml/5l vette. Rasva, tahma ja kuivanud mustuse eemaldamiseks: 100–200ml/5l vette. Vana põrandavaha eemaldamiseks: 250 – 500 ml/5l vette.

Pesulahus kantakse põrandale kas mopiga või põrandapesumasina abil. Tugeva mustuse ja vaha eemaldamiseks lastakse toimida 5 – 10 minutut . Seejärel pinnad loputatakse. WIPER EXTRA vesilahust (töölaluse kontsentratsioon sõltub rasvasuse/mustuse astmest) võib kasutada ka suurtöökohtades ja toidukäitlemisettevõtetes väga rasvaste ja tahmaste pindade puhastamiseks.. Selleks soovitame kasutada vahupritsi, et tagada ohutu pinnalekandmine. Lasta toimida mõne minuti ja seejärel korralikult pinnad loputada.



5000 ml



Märkused

# CLEAN FLOOR

## Põrandapesuvahend masinpesuks

CLEAN FLOOR on vähevahutav kontsenteeritud leeliseline üldpuhastusvahend veepesu taluvate põrandate nii masin- kui ka käsi pesuks. Kasutatakse kivipõrandate, linoleum- ja värvitud pindade ning glasuurplaatide igapäevaseks puhastamiseks. Võib kasutada ka tekstiili puhastamiseks ning moppide pesuks mopipesumasinas. Kontsentraadi pH 10-11.

**KASUTAMINE:** Masinpesu, mopipesu, igapäevane üldpuhastus. Vähemäärdund pinnad: 2,5 ml/5 L vette. Keskmiselt määrdund pinnad: 5 ml/ 5 L vette. Põhipuhastus, tugevalt määrdund pinnad: 10 – 20 ml/5 L vette. Plekieemaldus: võib kasutada ka kontsentratsioonina. Põhipuhastuse ja plekieemalduse järgselt tuleb pinnad loputada.



5000 ml



Märkused

# BOZO

## Sanitaarkeraamika hooldusvahend, rooste- ja lubjasetete eemaldaja

BOZO on tugevalt happeline viskoosne sanitaarruumide puhastus- ja desinfektsioonivahend. Sobib kasutamiseks WC-pottide, kraanikausside, keraamiliste plaatide ja vuugivahede puhastamiseks mustusest, rooste- ja lubjasetetest, muudest ladestunud sooladest ning nende tekitatud lõhnadest. Desinfitseerimiseks ning rooste- ja lubjasetete eemaldamiseks kasutada lahusest, väga tugevate plekkide korral võib niiskel pinnal kasutada ka kontsentrati. Kontsentraadi pH <1. Biotsiidi registreerimistunnistus nr 0025/05.

**KASUTAMINE:** töölahuse valmistamiseks lahustada kontsentrati vees (+20 – +40C) , kanda käsna või harjaga pinnale ning lasta mõjuda 5-10 min. Vajadusel harjata. Toimeaja möödudes loputada veega.

Igapäevaseks kahelpõrandate ja pindade hooldusamiseks lahjendada 5 – 50 ml kontsentrati 5l vees. Desifinteerimiseks ja rooste, mustuse ning lõhnade eemaldamiseks kasutada lahjendust 1:4. Lubiummistuste ja katlakivi eemaldamiseks kasutada lahjendust 1:2. Kahhelaatide vuugivahede puhastamiseks lahjendust 1:3.



1000 ml / 5000 ml



Märkused

# GLASS WASHER

## Valmislahus klaaspindade puhastamiseks

GLASS WASHER on vahend aknaklaaside, peeglite, klaasvitriinide, fajanss- ja kahhelaatide puhastamiseks ning poleerimiseks. Muudab pinnad säravpuhtaks, eemaldab mustuseplekid. Tootele on lisatud spetsiaalsed lisandid, mis tagavad, et GLASS WASHER-iga pestud klaaspindadele ei jää kuivamisel veejälgi ega triipe. Valmislahuse pH 8-9.

**KASUTAMINE:** Tegemist on kasutuseks valmis lahusega. Vahend puhustatakse lapile või pinnale, hõõrutakse kuni pind on kuiv ja puhas.



500ml



Märkused

# SMELL NET READY TO USE

Lõhna eemaldava toimega pesemisevahend, valmislahus

SMELL NET Ready To Use on valmislahus, mis on mõeldud veepesu taluvate pindade pesemiseks ja uriini lõhna eemaldamiseks. Töödelda võib kõiki veepesu taluvaid pindu kõikjal, kus on vajalik pesemine ja uriini vm. ebameeldiva lõhna eemaldamine: haiglates, sanatooriumites, hooldekodudes, lasteasutustes, saunades, basseini- ja veeprotseduuriruumides, veterinaarkliinikutes. Toode sobib kasutamiseks ka koduses majapidamises sanitaarruumide puhastamiseks (eemaldab uriinikivi) ning lemmikloomade uriini või muu ebameeldiva lõhna eemaldamiseks (nt. kassiliivakastid jne.). Toode on lõhnastatud ja peale kasutamist jääb ruumidesse piparmündi lõhn. pH 3.

**KASUTAMINE:** SMELL NET Ready To Use valmislahusega pestakse ruume ja inventari (põrandad, seinad, dushiruumid, WC potid, liivakastid). Pinnad ei vaja veega üle loputamist (põrand ja WC). Soovi korral võib pinnad üle loputada (nt. loomade inventari ja riiete puhul). Toimeaeg 5 minutit.



500 ml



Märkused

# CASCADE HIGH

Kontsentreeritud fosfaadivaba nõude- ja üldpesuvahend

CASCADE HIGH on apelsinilõhnaline kontsentreeritud vedel pesuvahend, mis sobib toidunõude, klaas- ja plastmassesemete ning üldpindade käsipesuks. Toode on tõhusa rasva eemaldava toimega ning annab nõudele ja pestavale pinnale särava läike. CASCADE HIGH-ga pesemine ei kahjusta käsi ning toode sobib kasutamiseks nii toiduainetega tegelevates ettevõtetes kui ka tervishoiu- ja lasteasutustes. Sobilik ka kosmeetikatarvikute pesemiseks.

pH 5 - 5,5



1000 ml / 5000 ml



Märkused

# PLUMBER

Kanaliseerimisitorude ummistuste avaja

PLUMBER on tugevalt leeliseline vahend kanalisatsioonitorude ummistuste kõrvaldamiseks ning ärahoidmiseks. Eemaldab torudesse kogunenud toidurasvad, seebi, juuksekarvad ja muud orgaanilised jäägid.

**KASUTAMINE:** Toodet kasutatakse kontsentraadina, kuid soovi korral võib lisada keevat vett (vahekorras 1:1), mis kiirendab lagunemisprotsessi. Lasta mõjuda sõltuvalt ummistusest 15 minutit kuni 2 tundi, vajadusel kasutada imipumpa. Toimeaja möödudes loputada veega.

pH >11



1000 ml / 5000 ml



Märkused

# TROPIC FRESH

Õhuvärskendaja

TROPIC FRESH on vee baasil toipelttoimega õhuvärskendaja, mida kasutatakse inimesest lähtuva ebameeldiva lõhna eemaldamiseks ja ümbritseva õhu värskendamiseks. Toodet pihustatakse õhku. Esmalt neutraliseerib see inimesest lähtuva ja ruumis oleva ebameeldiva lõhna, seejärel jätab ruumidesse värsket aroomi pikemaks ajaks. Sobilik kasutamiseks ka jalgadele, jalanõudesse ja teistesse kohtadesse, millest võib erituda ebameeldivat lõhna. Kokkupuutel nahaga ei põhjusta ärritust ega allergiat.




250 ml



Märkused

# INSTRUMENTIDE DESINFEKTSIOON JA PUHASTUS

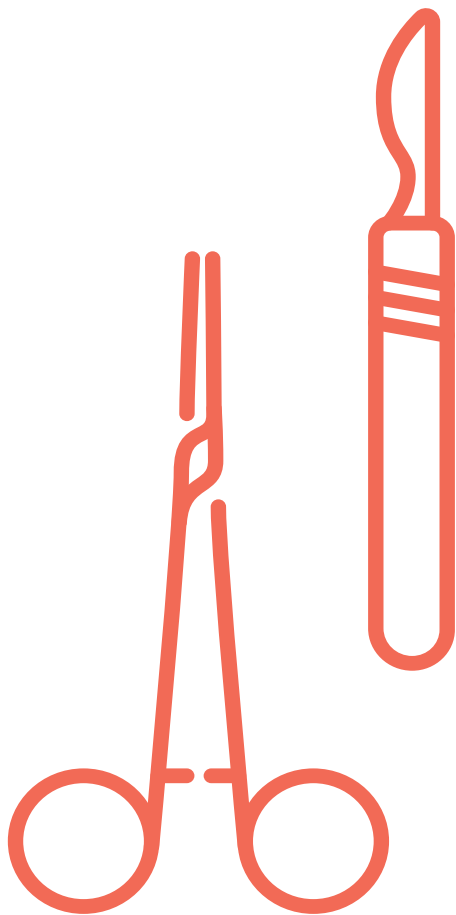

## DES INSURANCE

### Instrumentaariumi desinfitseeriv pesemisvahend

DES INSURANCE on puhastus- ja desinfektsioonivahend meditsiiniinstrumentide kuum- või keemilise sterilisatsiooni-eelseks pesemiseks ja desinfitseerimiseks. Sobib kõikide veepesu taluvate instrumentide pesemiseks. Toode on materjalisõbralik. Eemaldab meditsiinilistelt instrumentidelt vere, valgud, sekreedid ja rasvad. Loputamisel eemaldub materjaldelt kiiresti ja täielikult. DES INSURANCE on laia antimikroobse toimega, hävitab Gram-positiivseid ja Gram-negatiivseid baktereid, seeni, viiruseid (sealhulgas HBV, HIV).

**KASUTAMINE:** Kohe peale kasutamist asetada lahtivõetud instrumendid kaanega suletavasse DES INSURANCE 1% töölahusega täidetud vanni 10 minutiks. Jälgida, et kogu pestav instrumentaarium oleks lahusega kaetud. Toimeaja möödudes instrumendid pesta ja loputada jooksva veega ning vajadusel steriliseerida. Kasutamisel masinpesuseadmetes soovitatav lisada vahu regulaatorit. Töölahused valmistada kontsentradi lahustamisel vees. Valmis töölahus säilib suletult 14 ööpäeva, kasutusel olev lahust 1 ööpäev. Ei sisalda fosfaate. Töölahuse kasutamine on ruumis viibivatele inimestele kahjutu.

pH 11 kontsentradi, kasutuslahusel 9,0 -10,0

**KOOSTIS:** 100 g toodet sisaldab: C12-18-alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid (ADBAC (C12-18)) 2,5 g (toimeaine), C(C12-14)-alküüldimetüül(etüülbensüül)ammooniumkloriid (ADEBAC (C12-14)) 2,5 g (toimeaine), mitteionogeensed tensiidid 5-15 g, kaltsineeritud sooda, kompleksimoodustaja, lõhnaaine.

#### STANDARDID:

|         |         |          |          |
|---------|---------|----------|----------|
| EN 1040 | EN 1275 | EN 13624 | EN 13727 |
|---------|---------|----------|----------|



1000 ml / 5000 ml



Märkused

# STERISEPT INSTRU

## Aldehüüdivaba meditsiiniinstrumentide puhastus- ja desinfektsioonivahend

STERISEPT INSTRU on vahend termostabiilsete ja -labiilsete meditsiiniinstrumendi desinfektsiooniks ja desinfitseerivaks eelpesuks. Toode sobib kasutamiseks haiglates, laborites, hambaravikliinikutes ning teistes tervishoiuasutustes. STERISEPT INSTRU sobib ka ultrahelivannides kasutamiseks. STERISEPT INSTRU on kontsentratsioon. Lahjendus vastavalt nõutavale toimele 0,25-1%.

**KASUTAMINE:** Instrumentide desinfektsioon ja pesu leotusmeetodil: aseta eelnevalt lahtivõetud instrumendid STERISEPT INSTRU toatemperatuuril töölauas. Puhastada instrumente mehaaniliselt ja veenduda, et need on pesuvannis korralikult lahusega kaetud. Peale vajaliku toimeaja möödumist loputada instrumendid põhjalikult. Valmisgegatud töölauas on sõltuvalt kasutuskõrreususest kõlblik kuni 14 päeva. Kui lahus on visuaalselt kontamineerunud, tuleb see koheselt välja vahetada. **Tähelepanu!** STERISEPT INSTRU ei sobi kasutamiseks koos aldehüüdiidebaasil toodetega! Toode on ette nähtud kutsealaseks kasutamiseks.

**KOOSTIS:** 100 g toodet sisaldab: Didetsüüldimetüülammoonium- kloriid 15 g (toimeaine); N-(3-aminopropüül)-N-dodetsüül-propaan-1,3-diamiin 15 g (toimeaine), mitteionogeensed tensiidid, kompleksimoodustaja, pH regulaator.

### STANDARDID:

|          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| EN 13624 | EN 13727 | EN 14348 | EN 14476 | EN 14561 | EN 14562 | EN 14563 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|



Märkused

# CHEMIHYD DES

## Aldehüüdi baasil meditsiiniinstrumentide ja endoskoopide kõrgastme desinfektsioonivahend

CHEMIHYD DES on valmis töölauas termostabiilsete -ja labiilsete meditsiiniinstrumentide desinfektsiooniks. Sobib ka painduvate ja jäikade endoskoopide desinfitseerimiseks.

**KASUTAMINE:** CHEMIHYD DES on valmis töölauas, mida ei lahjendata. Asetada eelnevalt pestud ja lahtivõetud instrumendid CHEMIHYD DES lahusesse. Veenduda, et kõik instrumentide pinnad ja õõnsused on lahusega kaetud. Peale vajaliku toimeaja möödumist loputada instrumendid põhjalikult voolava vee all ja seejärel kuivatada. Töölauas on sõltuvalt kasutuskõrreususest kõlblik kuni 30 päeva.

**Tähelepanu!** CHEMIHYD DES ei sobi kasutamiseks koos amiinide baasil toodetega. Vältida amiinide baasil toodete kasutamist enne ja pärast CHEMIHYD DES-ga desinfitseerimist!

**KOOSTIS:** 100 g toodet sisaldab toimeainet: glutaaraldehüüd 2,5 g.

### STANDARDID:

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| EN 13624 | EN 13704 | EN 13727 | EN 14348 | EN 14476 |
|----------|----------|----------|----------|----------|



Märkused



# CHEMISEPT SPRAY

## Kosmeetikainstrumentide ja -tarvikute desinfektsioonivahend

CHEMISEPT SPRAY sobib alkoholi taluvate kosmeetikainstrumentide ja -tarvikute desinfektsiooniks (kosmeetilised lusikad, pintslid, tangid, küüneviilid, kammid, fõõniharjad, juukseharjad, juukselõikurmasinad terad ja kammid, samuti maniküüri instrumendid). CHEMISEPT SPRAY omab laia toimespektrit mikroorganismide vastu, toimeaeg 30 sekundit. CHEMISEPT SPRAY sisaldab instrumentide kaitseks glütseriini, tootes on kasutatud puhast ja vähelenduvat etüülalkoholi, et vältida hingamisteede ärritust. Tootel on nõrk piparmündi lõhn. Toode on ette nähtud kutsealaseks kasutamiseks. Biotsiidi registreerimistunnistus nr 1588/17.

**KOOSTIS:** 100 g toodet sisaldab: etanool 85 g (toimeaine), C12-18-alküül- dimetüülbensüülammooniumkloriid (ADBAC (C12-18))0,05 g (toimeaine), C(C12-14)-alküüldimetüül(etüülbensüül)ammooniumkloriid (ADEBAC (C12-14)) 0,05 g (toimeaine), glütseriin, lõhnaaine.



Märkused

# CHEMIDES PULVER

## Aktiivhapnikul põhinev meditsiiniinstrumentide kõrgastme desinfektsioonivahend

CHEMIDES PULVER on pulbriline vahend meditsiiniinstrumentide kõrgastme desinfektsiooniks. Sobib ka pindade puhastamiseks, kuna eemaldab tõhusalt orgaanilise mustuse. Toode on laia bakteritsiidse (sh tuberkuloositekitaja), sporiitsiidse, viirusiidsed ja fungitsiidse toimega. CHEMIDES PULVER-i lahustumisel vabanevad pulbrist vesinikperoksiid ning peräädikhape, mis annavad tootele tugevad desinfitseerivad omadused. Pulber on keskkonnale ohutu, sest laguneb kasutamisel vees ja hapnikuks. pH 8 - 9 (kasutuslahus).

**KASUTAMINE:** Ühe liitri töölauase valmistamiseks lahustada 17,5 grammi pulbrit (üks mõõtlusikatäis) ühes liitris leiges kraanivees. Efektivsuse saavutamiseks segada lahust 15 minutit kuni kogu pulber on lahustunud ning lahus selge ja läbipaistev. Aseta instrumendid lahusesse. Pindade desinfitseerimiseks kata need töölauasega ning töötle kasutades pühkimis-, pihustamis- või märgpesumeetodit. Toimeaeg 15 minutit. Valmislahust tuleb vahetada iga kaheksa tunni möödudes või lahuse värvuse/läbipaistvuse muutumisel koheselt.

**KOOSTIS:** 100 g toodet sisaldab: naatriumperkarbonaat 41 g, tetraatsetüül-tüleen diamiin (aktivaator) 25 g; orgaanilised happed, stabilisaator, mitteionogeensed tensiidid, korrosiooni inhibiitor.

### STANDARDID:

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| EN 13624 | EN 13697 | EN 13704 | EN 13727 | EN 14348 |
| EN 14476 | EN 14561 | EN 14562 | EN 14563 | EN 17126 |



Märkused

# KUIDAS VALIDA INSTRUMENTIDE PUHASTUS- JA DESINFEKTSIOONIVAHENDIT?

| Toode            | Valmislahus / kontsentratsioon | Aktiivaine                                                                            | Puhastus / desinfektsioon                                                           |  | Toime haigustekitajatesse ja toimeaeg                                                                                                                                                                                                                                                                 | Instrumendi ja materjalisobivus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STERISEPT INSTRU | Kontsentratsioon               | Kvaternaarsed ammooniumühendid ja amiinid                                             | ✓ Desinfitseeriv eelpesu<br>✓ Masinpesu/ultrahelivann<br>✗ Kõrgastme desinfektsioon |  | Bakteritsiidne (k.a MRSA, VRE)<br><br>Mükobakteritsiidne (k.a Mycobacterium avium ja Mycobacterium terrae)<br><br>Kõik ümbrisega viirused (HBV, HIV, HCV)<br><br>Ümbriseta viirused (Adeno-, Noro- Polio)<br><br>Fungitsiidne ja pärmseentevastane toime<br><br>Spoor C. difficile                    | 15 min - 30 min<br><br>15 min - 30 min<br><br>5 min - 15 min<br><br>15 min<br><br>5 min - 60 min<br><br>60 min<br><br>Metallid - roostevaba teras, alumiinium<br><br>Jäik plastik, jäik kumm, silikoon<br><br>Klaas<br><br><b>Vältida aldehüüde sisaldava aine kasutamist enne ja pärast STERISEPT INSTRU-ga desinfitseerimist!</b>                                                           |
| DES INSURANCE    | Kontsentratsioon               | Kvaternaarsed ammooniumühendid                                                        | ✓ Desinfitseeriv eelpesu<br>✓ Masinpesu/ultrahelivann<br>✗ Kõrgastme desinfektsioon |  | Bakteritsiidne (k.a MRSA)<br><br>Fungitsiidne ja pärmseentevastane toime                                                                                                                                                                                                                              | 10 min<br><br>10 min<br><br>Metallid<br><br>Klaas, akrüül- ja pleksiklaas<br><br><b>Kõik vett taluvad materjalid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CHEMIHYD DES     | Valmislahus                    | Glutaaraldehüüd                                                                       | ✗ Desinfitseeriv eelpesu<br>✗ Masinpesu/ultrahelivann<br>✗ Kõrgastme desinfektsioon |  | Bakteritsiidne (k.a MRSA, VRE)<br><br>Mükobakteritsiidne (k.a Mycobacterium avium ja Mycobacterium terrae)<br><br>Kõik ümbrisega viirused (HBV, HIV, HCV)<br><br>Pärmseentevastane toime<br><br>Clostridium. difficile                                                                                | 5 min<br><br>15 min<br><br>10 min<br><br>5 min<br><br>60 min<br><br>Metallid<br><br>Plastik, kumm, silikoon<br><br>Klaas, akrüül- ja pleksiklaas<br><br><b>Vältida amiinide baasil toodete kasutamist enne ja pärast CHEMIHYD DES-ga desinfitseerimist!</b>                                                                                                                                   |
| CHEMIDES PULVER  | Kontsentratsioon               | Peräädikhape saadud tetraatsetüületüleendiamiinist (TAED) ja naatriumper-karbonaadist | ✓ Desinfitseeriv eelpesu<br>✓ Masinpesu/ultrahelivann<br>✓ Kõrgastme desinfektsioon |  | Bakteritsiidne (k.a MRSA, VRE)<br><br>Mükobakteritsiidne (k.a Mycobacterium avium ja Mycobacterium terrae)<br><br>Kõik ümbrisega viirused (HBV, HIV, HCV)<br><br>Ümbriseta viirused (Adeno-, Noro- Polio)<br><br>Fungitsiidne ja pärmseentevastane toime<br><br>Spoor C. difficile, Spoor B. subtilis | 15 min - 30 min<br><br>5 min - 15 min<br><br>5 min - 15 min<br><br>5 min - 15 min<br><br>5 min - 15 min<br><br>5 min - 15 min<br><br>Metallid<br><br>PVC, linoleum, keraamilised plaadid<br><br>Nahkpinnad, tekstiil, kangas<br><br>Plastik, kumm, silikoon<br><br>Klaaspinnad, akrüül- ja pleksiklaas<br><br><b>Ei sobi kasutamiseks vask, tina, pronks, messing ja alumiinium-pindadel.</b> |

# STANDARDID

## KÄTE ANTISEPTIKA JA PESU

EN 12791 - kirurgiline käte antiseptika

EN 1499 - hügieeniline käte pesu

EN 1500 - hügieeniline käte antiseptika

## TOIME VIIRUSTESSE

EN 14476

EN 16777

## TOIME BAKTERITESSE

EN 1040

EN 1276

EN 13727 (sh MRSA, VRE)

EN 14561

## TOIME PÄRM- JA/VÕI HALLITUSSEENTESSE

EN 1275

EN 13624

EN 14562

EN 1650

## TOIME TUBERKULOOSI- JA/VÕI MÜKOBAKTERITESSE

EN 14348

EN 14563

## TOIME BAKTERITESSE JA/VÕI PÄRM- JA/VÕI HALLITUSSEENTESSE

EN 13697

EN 17387

## TOIME SPOORIDESSE

EN 13704

## DESINFITSEERIVATE RÄTIKUTE TOIME BAKTERITESSE JA/VÕI PÄRMSEENTESSE

EN 16615



# DOSAATORPUDELITE KANDURID

## PUUTEVABA DOSAATORJAAM:

- 500 ml Chemi-Pharmi pudelile
- Hügieeniline puutevaba doseerimine
- Doseering: 1.0 ml või 1.5 ml / kord
- Muudetav doseerimiskordade arv: 1, 2, 3 doosi
- Komplekti kuulub: puutevaba dosaator, roostevaba jalg, tilgapüüdja, kätehõõrde juhend
- Hügieeniline läikiv ning kergelt puhastatav pealispind
- Mõeldud käte antiseptikumi doseerimiseks avalikes kohtades, tõkestamaks infektsioonide levikut.



500 ml

Märkused

## DOSAATORJAAM

- 500 ml ja 1000 ml Chemi-Pharmi pudelile
- Doseering: 3ml
- Kätehõõrde juhend kuulub komplekti
- Ergonoomiline kasutuskõrgus
- Lukustatav
- Mõeldud käte antiseptikumi doseerimiseks avalikes kohtades, tõkestamaks infektsioonide levikut.



500 ml / 1000 ml

Märkused



## SEINALE KINNITATAV PUUTEVABA DOSAATOR

- 500 ml Chemi-Pharmi pudelile
- Hügieeniline puutevaba doseerimine
- Doseering: 1.0 ml või 1.5 ml / kord
- Muudetav doseerimiskordade arv: 1, 2, 3 doosi
- Seinale kinnitatav
- Kätehõõrde juhend kuulub komplekti
- Tilgapüüdja lisatarvikuna
- Hügieeniline läikiv ning kergelt puhastatav pealispind
- Mõeldud käte antiseptikumi doseerimiseks avalikes kohtades, tõkestamaks infektsioonide levikut.



500 ml

Märkused

## SEINALE KINNITATAV PUUTEVABA DOSAATOR

- 1000ml Chemi-Pharm dispensopakendile
- Hügieeniline puutevaba doseerimine
- Neli seadistatavat doseerimiskogust: 1,6 ml kuni 6,4 ml
- Paigaldatav ainult seinale (paigalduskomplekt kaasas)
- Hügieeniline läikiv ning kergelt puhastatav pealispind
- Tilgapüüdja lisatarvikuna
- Mõeldud käte antiseptikumi doseerimiseks avalikes kohtades, tõkestamaks infektsioonide levikut.



1000 ml

Märkused



# DOSAATORPUDELITE SEINAKANDURID KANGIGA JA ILMA



500 ml / 1000 ml



Märkused

# DOSAATORPUDELI VOODIKANDUR



500 ml



Märkused

# DISPENSOPUDELI SEINAKANDUR




1000 ml



Märkused

# DOSAATORPUDELITE SIINIKANDURID KANGIGA JA ILMA

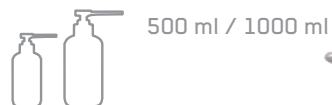

500 ml / 1000 ml



Märkused

# KÄTEHÕÖRDE TEHNIKA



**1** Hõõru kordamööda mõlema käe sõrmeotsi ringlevate liigutustega vastaskäe peopesas



**2** Hõõru mõlema käe sõrmevahesid kordamööda käe selja poolt



**3** Hõõru kergelt ristatud sõrmi üksteise vastu



**4** Hõõru sõrmede pealispindu hoides neid kõverdatult vastaskäe peopesas



**5** Hõõru kordamööda mõlema käe pöidlaid ringlevate liigutustega vastaskäe peopesas



**6** Hõõru peopesi vastamisi NB! Ära unusta randmeid!



**PESEMINE** - Doseeri pesuvahend märgadele kätele. Järgi kätehõõrde tehnikat (vt. joonis). Loputa ja kuivata käed. Sulge kraan paberiga.



**ANTISEPTIKA** - Doseeri antiseptikum kuivadele kätele. Järgi kätehõõrde tehnikat (vt. joonis). NB! Veendu, et kogu töödeldav nahapind oleks antiseptikumiga kaetud. Hõõru 30 sekundi jooksul kuivamiseni.

**NB!** Igat kätehõõrde tehnika sammu korrata vähemalt 5 korda enne järgmise juurde asumist.

